

KULLANMA TALİMATI

PANTHOL EYE tek dozluk göz damlası

%2 dekspantenol ve %0,15 sodyum hiyalüronat içeren göz damlası

Steril, koruyucu madde içermeyen, berrak ve renksiz çözelti

Gözün daha iyi nemlenmesi için geliştirilmiş kuruluk giderici ve yatıştırıcı

Bileşim

Dekspantenol, sodyum hiyalüronat, sodyum klorür, disodyum fosfat susuz, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat ve enjeksiyonluk su.

PANTHOL EYE nedir ve ne için kullanılır?

PANTHOL EYE gözün kornea tabakasında koruyucu madde içermeyen, steril, viskoelastik, berrak bir koruyucu film oluşturur. PANTHOL EYE hiyalüronik asidin sodyum tuzu olan ve üstün fiziksel özellikleri nedeniyle kornea tabakası üzerinde görme yetisini bozmadan çok uzun süre kalabilen eşit dağılımlı stabil bir koruyucu film oluşturan sodyum hiyalüronat içerir. PANTHOL EYE ayrıca yüksek su bağlama kapasitesi sayesinde gözü nemlendirme ve göze koruyucu bakım yapma özelliğine sahip olan Provitamin B5 (dekspantenol) içerir. Bu sayede, sodyum hiyalüronatın nemli tutma özellikleri uygun şekilde desteklenir.

Sodyum hiyalüronat (gözyaşı filmini stabilize edici) ile dekspantenolden (koruyucu ve yatıştırıcı) oluşan kombinasyon göz yüzeyini korur, nemlendirir ve kaygan hale getirir. Bu kombinasyon sayesinde;

- Sert veya yumuşak kontakt lens kullanımında veya gözde teşhissel müdahalelerdeki mekanik zorlanma,
- Klima cihazları, rüzgar, soğuk, kuruluk veya örneğin havadaki sigara dumanı gibi kirlilikler nedeniyle oluşan çevresel stres veya
- Bilgisayar ekranına, mikroskoba bakarak çalışmak ve uzun süreli araba kullanmak nedeniyle gözlerin yıpranmış olması gibi durumlardan kaynaklanan şikayetlerde gözü uzun süre kalıcı şekilde yatıştırır.

PANTHOL EYE'ı nasıl kullanmalısınız?

Değişik yaş grupları:

Kullanımında yaş sınırlaması yoktur.

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda, PANTHOL EYE gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:


Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Cinsiyet:


Kullanımında herhangi bir cinsiyet farkı yoktur.

Göze damlatılarak kullanılır.


PANTHOL EYE, tek kullanımlıktır. Çözeltinin kalan kısmını kullanmayınız.

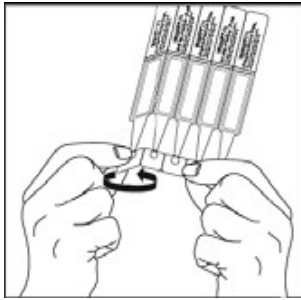

1. Bir adet tek doz flakonu ayırınız. Her bir tek doz flakonu kullanırken flakonun veya saşenin zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz.

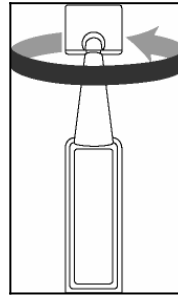

2. Açmak için tek doz flakonun yassı ucunu çeviriniz (çekmeyiniz).

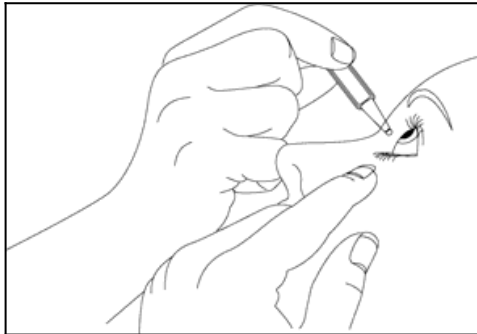

3. Başınızı biraz geriye doğru eğiniz, yukarıya doğru bakınız ve alt göz kapağınızı biraz aşağıya doğru çekip alt göz kapağınızın içine ihtiyaca göre günde 3-5 kez birer damla damlatınız. Sıvının gözün yüzeyi üzerine eşit şekilde dağılması için gözlerinizi yavaşça kapatınız.

PANTHOL EYE, koruyucu madde içermediği için uzun süreli kullanımda dahi iyi tolere edilir.

PANTHOL EYE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- PANTHOL EYE'ın içerdiği herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
- Gözünüzde enfeksiyon veya yara varsa kullanmayınız.

PANTHOL EYE'ı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

- Saşeler veya tek dozluk flakonlar hasarlı ise ürünü kullanmayınız.
- Flakonun ucunu gözünüze temas ettirmeyiniz.
- Çok nadir durumlarda göz damlasının kullanılması çok hassas gözlerde tahrişe neden olabilir.

- Başka göz damlaları / göz merhemleri de kullanıyorsanız, iki ilacın kullanımı arasında 15 dakika süre bırakılmalıdır. Böyle bir durumda PANTHOL EYE her zaman en son uygulanmalıdır.
- Uygulamanın ardından kısa bir süre görme keskinliğinde azalma olabilir; bu durumda taşıt veya makine kullanılmamalı ve normal görme keskinliğine tekrar kavuşana kadar beklenmelidir.
- Göz damlasını son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi etiketin ve kutunun üzerinde bulunmaktadır.
- PANTHOL EYE fosfat tamponu içerir. Gözün kornea tabakasında önemli bir hasar olması durumunda, uzun süre PANTHOL EYE kullanılması çok nadiren de olsa kalsiyum tuzlarının çökmesine neden olabilir.

Ticari ambalaj şekli

PANTHOL EYE tek dozluk göz damlası adlı ürünümüz 10'ar adet şeffaf, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) tek dozluk flakonlar içerisinde gözle görülür partikül içermeyen, berrak ve renksiz çözelti şeklindedir. Karton kutu içerisinde 20 adet tek dozluk flakon, 10'ar flakonluk alüminyum saşeler içerisinde ve kullanma talimatı (kullanım bilgisi) ile birlikte sunulur.

Saklama koşulları

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız.

2°C-25°C arasında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Dondurmayınız.

Saşeler açıldıktan sonra içerisinde bulunan flakonlar 10 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Flakonlar tek kullanımlıktır, kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Dumlupınar Mah.

Ankara Cad. No:2

Kartepe / KOCAELİ



Parti numarası



"Son kullanma tarihi" etiketin ve katlanır kutunun üzerinde basılıdır.



Kullanım kılavuzuna başvurun.



Üretim yeri



Üretim tarihi



Saşeler veya tek dozluk flakonlar hasarlı ise ürünü kullanmayınız.



Tekli bariyer steril sistem



Aseptik üretim



Onaylanmış kuruluş



Saklama sıcaklığı sınırları



Yeniden kullanmayın



Benzersiz ilaç tanımlayıcısı
869952530027521YS



Tıbbi cihaz

Bu kullanma talimatı 03.04.2020 tarihinde güncellenmiştir.